

schülke -†



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi KAS a aminu, určený pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů

Také do kuchyní

desam[®] extra

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Výborná materiálová snášenlivost
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Vhodný také do potravinářství a nemocničních kuchyní
- Kompatibilní s utěrkami wetsack a schülke wipes

Oblast použití

desam[®] extra je určený k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a prostor se zvýšeným rizikem růstu bakterií, mikroskopických vláknitých hub a plísní. Je vhodný pro použití ve všech oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně, obecné hygieně, v institucích a také v potravinářství. Díky kombinovanému účinku kvarterních amoniových sloučenin a aminů je bez zápachu, a proto je vhodný pro použití i v přítomnosti personálu a pacientů (např. na porodnická a novorozenecká oddělení, ARO, JIP, rehabilitace a léčebny, atp.). Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Účinnost

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní.

Návod na použití

desam[®] extra se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20-25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy,

směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze aplikovat také postříkem. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aldehydů či peroxidů. Povrchy, které po dezinfekci přichází do styku s potravinami, opláchněte řádně vodou.



Složení

100 g přípravku **desam[®] extra** obsahuje následující aktivní látky:

- 5 g didecyldimethylamonium chlorid
- 3,5 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl-amonium chlorid
- 6,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aldehydů či peroxidů. Povrchy, které po dezinfekci přicházejí do styku s potravinami, opláchněte řádně vodou. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam extra 1 l	12/Karton	70000066
Desam extra 5 kg	1/Kanistr	70000067

Související přípravky

- desam[®] effect
- terralin[®] protect

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku