

schülke -†



Práškový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci operačního instrumentaria, pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a povrchů zdravotnických prostředků

Účinný,
Ekonomický

chirosan® plus

Naše Plus

- Plné spektrum účinnosti
- Pro účinné mytí
- Účinný od 5 min
- Rozpustný, nepěňivý
- Stabilita roztoku 36 hodin

Oblast použití

chirosan® plus je určen k manuální dezinfekci a čištění nástrojů a pomůcek bezprostředně po použití ponořením do předem připraveného pracovního roztoku. Také je vhodný pro použití v UZV čistíčkách.

Přípravek je vhodný také pro dezinfekci:

- povrchů a ploch zdravotnických prostředků otřením (vodoléčebné vany)
- dentálních otiskovacích hmot
- anesteziologického příslušenství
- tonometrů
- dýchacích masek
- endoskopů, inkubátorů, apod.

chirosan® plus je materiálově kompatibilní s běžnými materiály používanými ve zdravotnické praxi. Doporučuje se na nástroje a pomůcky z chirurgické oceli, skla, plastu, porcelánu, keramiky a plexiskla. Není vhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku, pryže a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Návod na použití

Příprava roztoku: Do dezinfekční nádoby přesně odměřte množství vody o teplotě 20 °C ±1. Vsypete odměřené množství prášku **chirosan® plus** dle dávkovací tabulky a důkladně zamíchejte. Po 15-ti minutové aktivaci a opětovném důkladném promíchání je roztok připraven k použití. Nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Poté se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou. Plochy zdravotnických prostředků a pomůcek lze dezinfikovat a čistit také pomocí otěru. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Při použití produktu **chirosan® plus** na vodoléčebné vany doporučujeme aplikovat koncentraci 2% po dobu 5 min. Poté je nutný oplach horkou vodou.

CE 1023

Složení

chirosan® plus obsahuje následující aktivní látky:

- in situ generovaná kyselina peroxyoctová
(2% roztok obsahuje více než 1000 ppm kyseliny peroxyoctové)

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Důsledně dodržujte instrukce k použití. Není vhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku, pryže a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Chirosan plus 6 kg nw cz, sk, pl, en, tr	1/Kartón	70000083
Chirosan plus 1,5 kg nw cz,sk,pl,en,tr	1/Kartón	70000081

Související přípravky

- chirosan®

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIb

