



desprej® new

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholu a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů.

Naše Plus:

- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- Dobrá materiálová snášenlivost
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití:

desprej® new je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, kosmetických, pedikérských a tatoo salonech, fitness a wellness centrech (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat, jako např.:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Operační stoly a okolní povrchy
- Jídelní stoly a pracovní plochy

Návod na použití:

desprej® new se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postříku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otěrejte po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akrylát, lesklé plasty).

Použití	Expozice
Dezinfekce a čištění ploch a povrchů	od 30 s

Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Účinnost	Norma	Expozice
Baktericidní	EN 13727+A2	15 s
	EN 13697	30 s
Levurocidní	EN 13697	30 s
Fungicidní	EN 13624	15 s
	EN 13697	60 s
Virucidní (BVDV)	DVV/RKI	15 s
Virucidní (Vaccinia)	DVV/RKI	30 s
Virucidní (Noro)	EN 14476+A1	30 s
Virucidní (Polio)	EN 14476+A1 ¹	30 s
Virucidní (Vaccinia)	EN 14476+A1	30 s
Virucidní (Adeno)	EN 14476+A1	30 s
Virucidní (Rota)	EN 14476+A1	30 s
Mykobaktericidní (M. Avium, M. terrae)	EN 14348	30 s

1 – čisté podmínky

Složení:

100 g přípravku **desprej® new** obsahuje následující účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

Vzhled	bezbarvá kapalina
Zápach (vůně)	charakteristická po alkoholu
Hustota	cca. 0,85 g/cm ³ / 20 °C

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Povrchy které mají přijít do styku s potravinami je nutné po dezinfekci umýt čistou vodou. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. **Teplota skladování:** -10 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu	Podnikové číslo
desprej® new	lahev 500 ml s rozprašovačem kanystř 5 l	20 1	70002032 70002033

Doba expirace:

36 měsíců

Typ přípravku:

Biocidní přípravek

Životní prostředí:

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

